



LOBATO'S

Diagnóstico digital

ENTREGA DIGITAL

TOMOGRAFIA COMPUTADA CONE BEAM

www.imageneslobato.com.ar

Para Descargar tus archivos de CBCT



Imágenes disponibles de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 hs

Búsque sus imágenes

Colocar el DNI del paciente

DNI:

Buscar

Descargar todo

Visor para archivos DCM - CONE BEAM

Descargar programa

Instructivo de descarga visor CONE BEAM

Descargar instructivo

Visor de archivos STL - Escaneos

Descargar programa



Sanguedolce Rios Gino - 04-05-23
Descargar

DESCARGAR EL ARCHIVO .DCM



lobatodiagnostico@gmail.com



lobatodiagnostico



3804 222009



Jaramillo 259 La Rioja Capital



Lobato Diagnostico Digital

Búsque sus imágenes

DNI:

Buscar

Descargar todo

Visor para archivos DCM - CONE BEAM

Descargar programa

Instructivo de descarga visor CONE BEAM

Descargar instructivo

Visor de archivos STL - Escaneos

Descargar programa



INICIARA LA DESCARGA DEL ARCHIVO



lobatodiagnostico@gmail.com



lobat



_- Sanguedolce Ri.....
48,7/77,2 MB, Falta 0 s.

Búsque sus imágenes

DNI:

Buscar

Descargar todo

Visor para archivos DCM - CONE BEAM


Descargar programa

Instructivo de descarga visor CONE BEAM

Descargar instructivo

Visor de archivos STL - Escaneos

Descargar programa

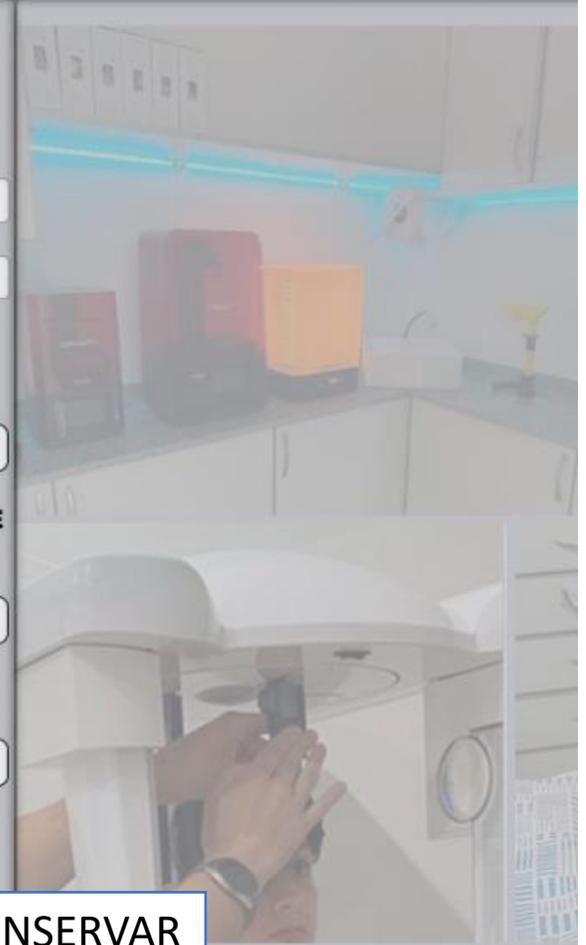

PRESIONAR EN CONSERVAR



lobato

Conservar

Más información




lobat



_- Sanguedolce Ri....dcm no es un archivo que se descargue de forma habitual y es posible que sea peligroso.

Descartar

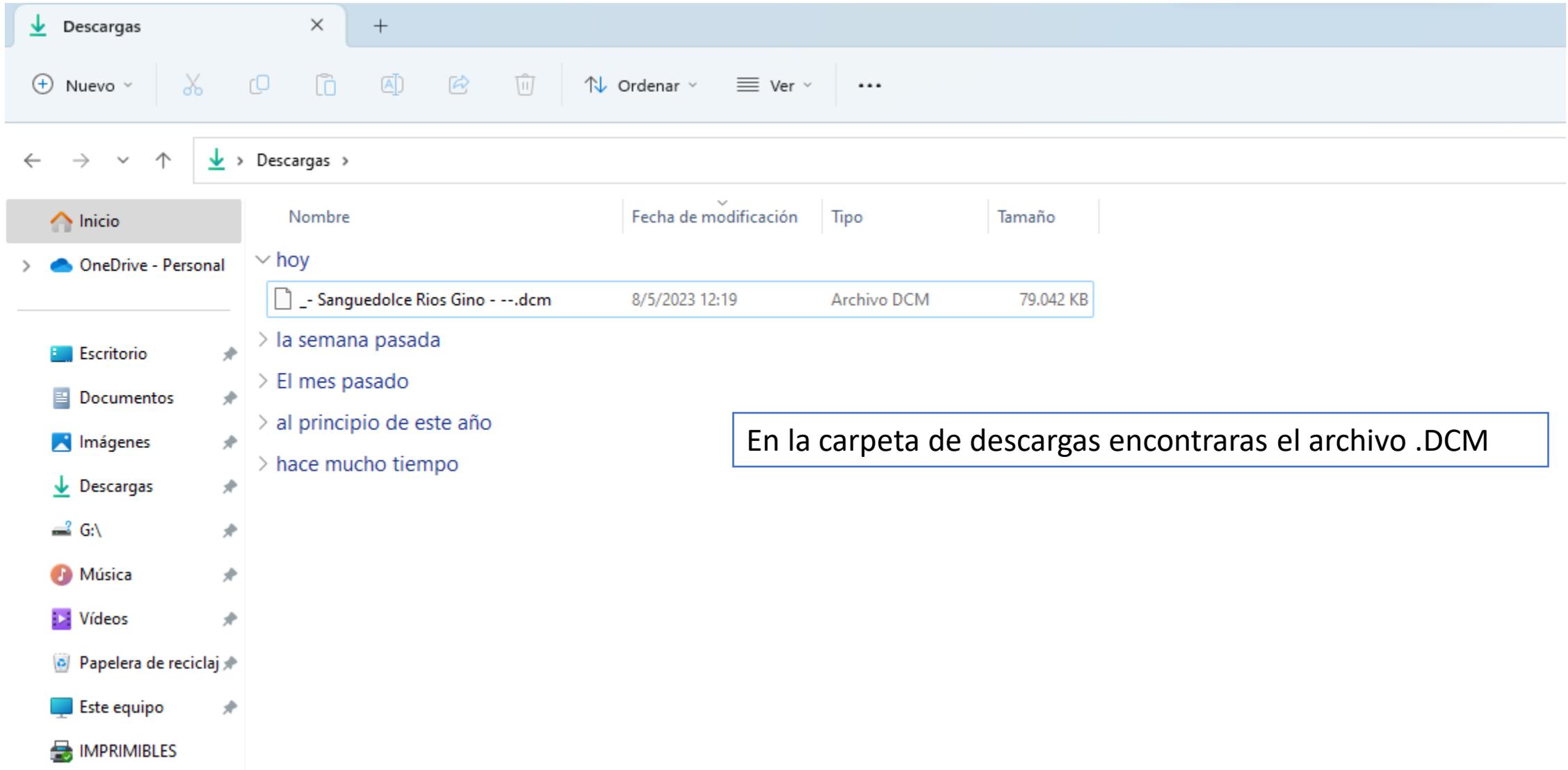

Descargas

Nuevo | Cortar | Copiar | Pegar | Compartir | Eliminar | Ordenar | Ver | ...

← → ↓ ↑ > Descargas >

- Inicio
- OneDrive - Personal
- Escritorio
- Documentos
- Imágenes
- Descargas
- G:\
- Música
- Vídeos
- Papelera de reciclaj
- Este equipo
- IMPRIMIBLES

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
▼ hoy			
- Sanguedolce Rios Gino - ---.dcm	8/5/2023 12:19	Archivo DCM	79.042 KB
▶ la semana pasada			
▶ El mes pasado			
▶ al principio de este año			
▶ hace mucho tiempo			

En la carpeta de descargas encontraras el archivo .DCM

Descarga de Visor



Imágenes disponibles de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 hs

Búsque sus imágenes

DNI:

Buscar

Descargar todo

Visor para archivos DCM - CONE BEAM

Descargar programa


Instructivo de descarga visor CONE BEAM

Descargar instructivo

Visor de archivos STL - Escaneos

Descargar programa

Hacer Clic y comenzara la descarga del Visualizador

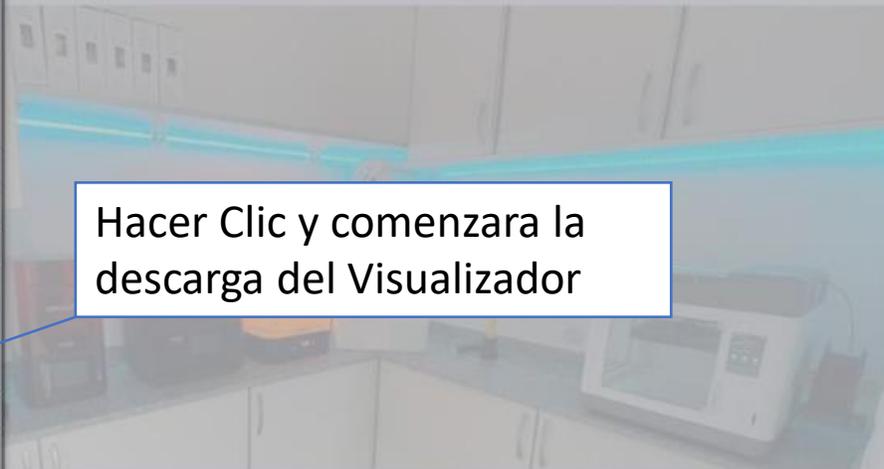

lobatodiagnostico@gmail.com



lobatodiagnostico



3804 222009



Jaramillo 259 La Rioja Capital



Lobato Diagnostico Digital

LOBATO'S
Diagnóstico digital

Imágenes

Búsque sus imágenes

DNI:

Buscar

Descargar todo

Visor para archivos DCM - CONE BEAM


Descargar programa

Instructivo de descarga visor CONE BEAM

Descargar instructivo

Visor de archivos STL - Escaneos

Descargar programa

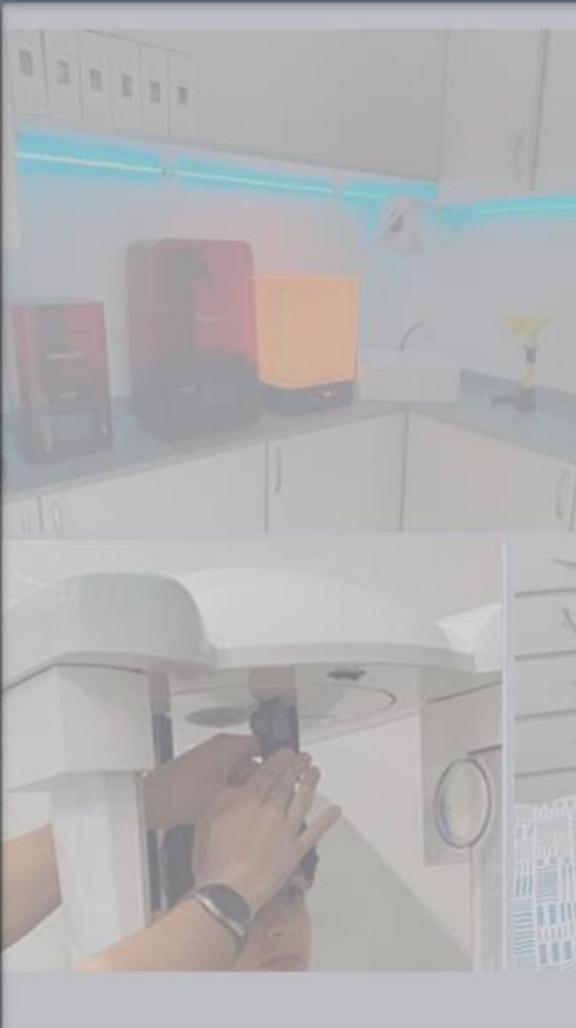

Comenzara la Descarga

PlanmecaRomexisV....zip
29,5/869 MB, Falta 1 min.

Descargas

Nuevo

Ordenar

Ver

Descargas

Escritorio

Nombre

hoy

PlanmecaRomexisViewer (1)

_- Sanguedolce Rios Gino - ...dcm

8/5/2023 12:19

Archivo DCM

79,042 KB

la semana pasada

El mes pasado

al principio de este año


hace mucho tiempo

En la carpeta descargas ya podrás encontrar el visor comprimido


336 elementos

OPCION 1

DESCOMPRESIR CON DESCOMPRESOR DE WINDOWS 11

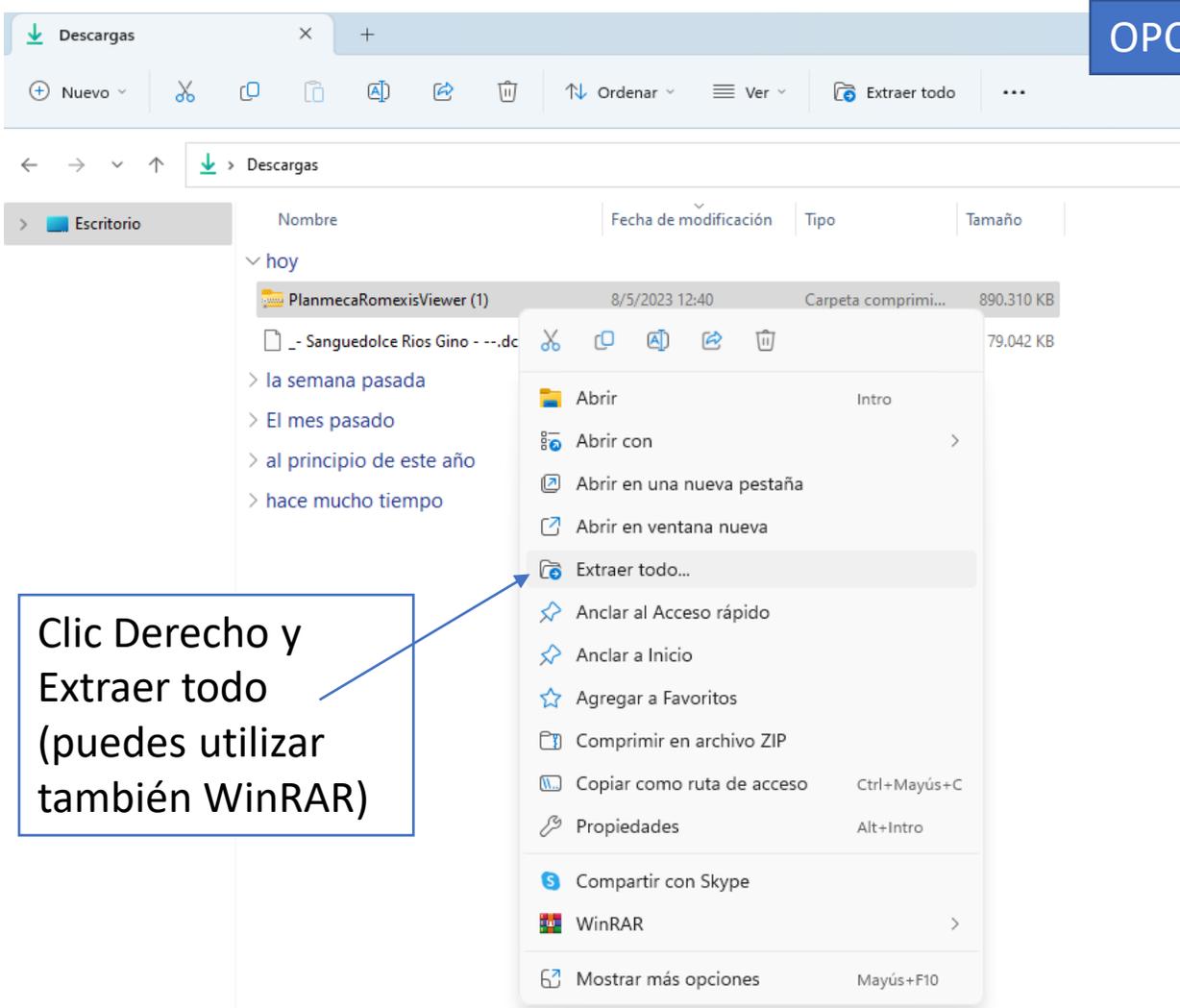

Clic Derecho y
Extraer todo
(puedes utilizar
también WinRAR)

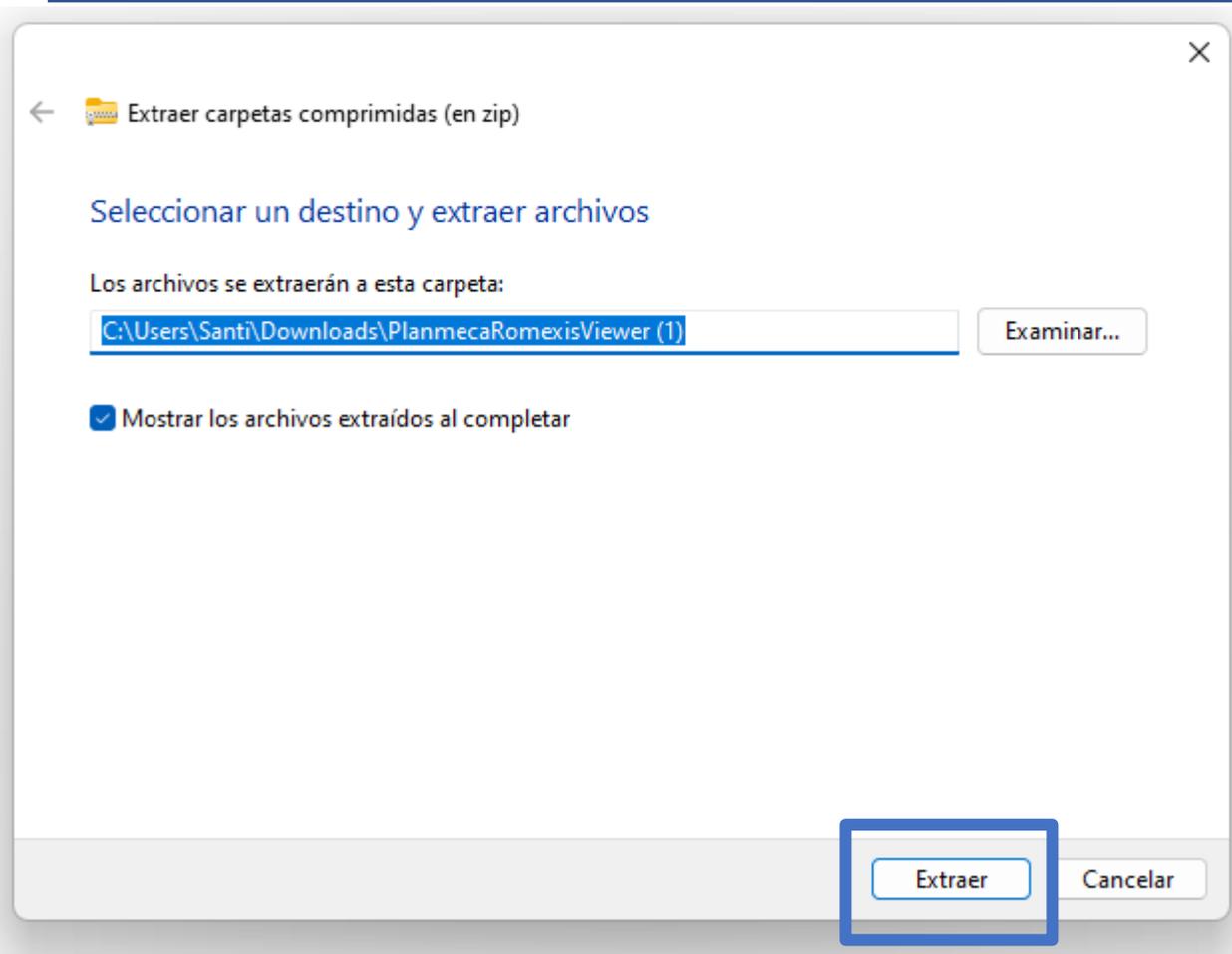

Descargas

Nuevo

Ordenar Ver

Escritorio

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
PlanmecaRomexisViewer (1)	8/5/2023 12:40	Carpeta compri...	890.310 KB
_ - Sanguedolce Rios Gino - ...dcm	8/5/2023 12:19	Archivo DCM	79.042 KB
PlanmecaRomexisViewer (1)	8/5/2023 12:45	Carpeta de archivos	

la semana pasada
El mes pasado
al principio de este año
hace mucho tiempo

Se Crea una Carpeta en donde ya tienes el Visor instalado

337 elementos

PlanmecaRomexisViewer (1)

Nuevo

Ordenar Ver

Escritorio

Descargas > PlanmecaRomexisViewer (1)



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
autorun	8/5/2023 12:45	Información sobre...	1 KB
Romexis_Viewer_Win	8/5/2023 12:45	Aplicación	15.891 KB
icons	8/5/2023 12:45	Carpeta de archivos	
Romexis_Viewer_OS_X.app			
data			

Desde este icono tenes acceso al visor

mentos

OPCION 2

DESCOMPRIMIR CON WINRAR

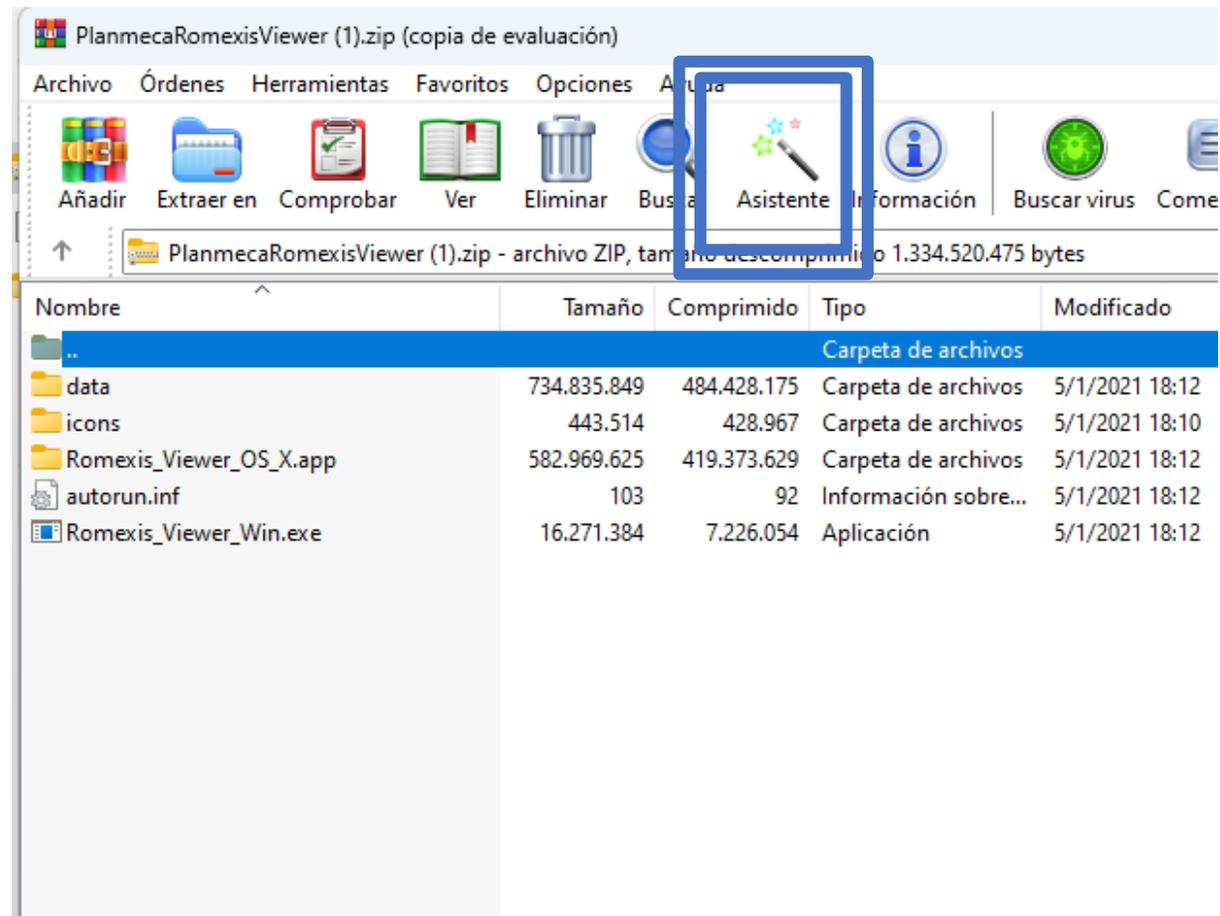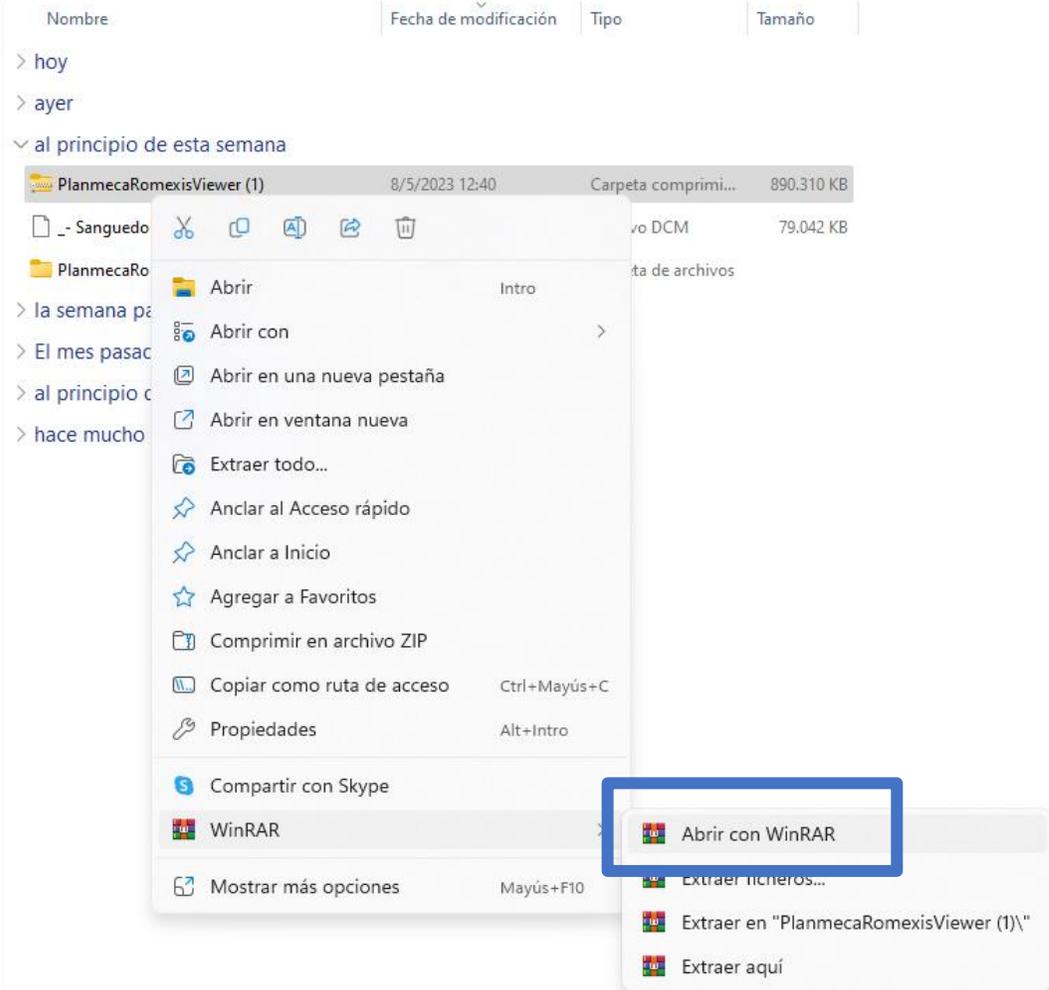

Abrir con WinRAR y presionar en ASISTENTE

Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

ip - archivo ZIP, tamaño descomprimido 1.334.520.475 bytes

Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Carpeta de archivos				
734.835.849	484.428.175	Carpeta de archivos		
443.514	428.967	Carpeta de archivos		
582.969.625	419.373.629	Carpeta de archivos		
103	92	Información sobre...		
16.271.384	7.226.054	Aplicación		

Asistente: Seleccione una carpeta para los ficheros

Por favor seleccione una carpeta para descomprimir los ficheros y pulse "Finalizar". Puede usar la carpeta que le sugerimos o pulsar "Examinar" para seleccionar otra.

Carpeta de destino para descomprimir los ficheros

Presionar en Finalizar y comenzara la extracción

Información sobre...	5/1/2021 18:12	CB66E271
Aplicación	5/1/2021 18:12	31FD4B7C

Extrayendo de PlanmecaRomexisViewer (1).zip

PlanmecaRomexisViewer (1).zip
extrayendo net.dll 6%

Tiempo transcurrido 00:00:01
Tiempo restante 00:00:02

Procesado 48%



Se Crea una Carpeta en donde ya tienes el Visor instalado

PlanmecaRomexisViewer (1)


Nuevo

PlanmecaRomexisViewer (1)



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
data	5/1/2021 18:12	Carpeta de archivos	
icons	5/1/2021 18:10	Carpeta de archivos	
Romexis_Viewer_OS_X.app	5/1/2021 18:12	Carpeta de archivos	
autorun	5/1/2021 18:12	Información sobre...	1 KB
Romexis_Viewer_Win	5/1/2021 18:12	Aplicación	15.891 KB

Desde este icono tenes acceso al visor

Doble Clic y se abrirá el Visualizador
"ROMEXIS 6"

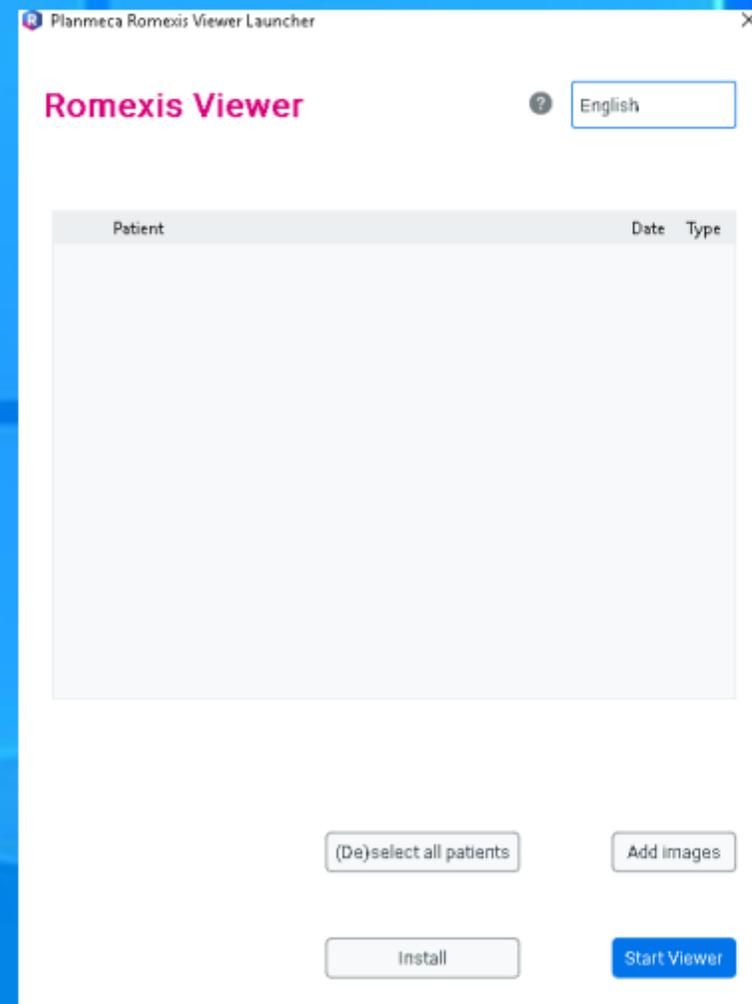

Seleccionamos el idioma por ejemplo Español

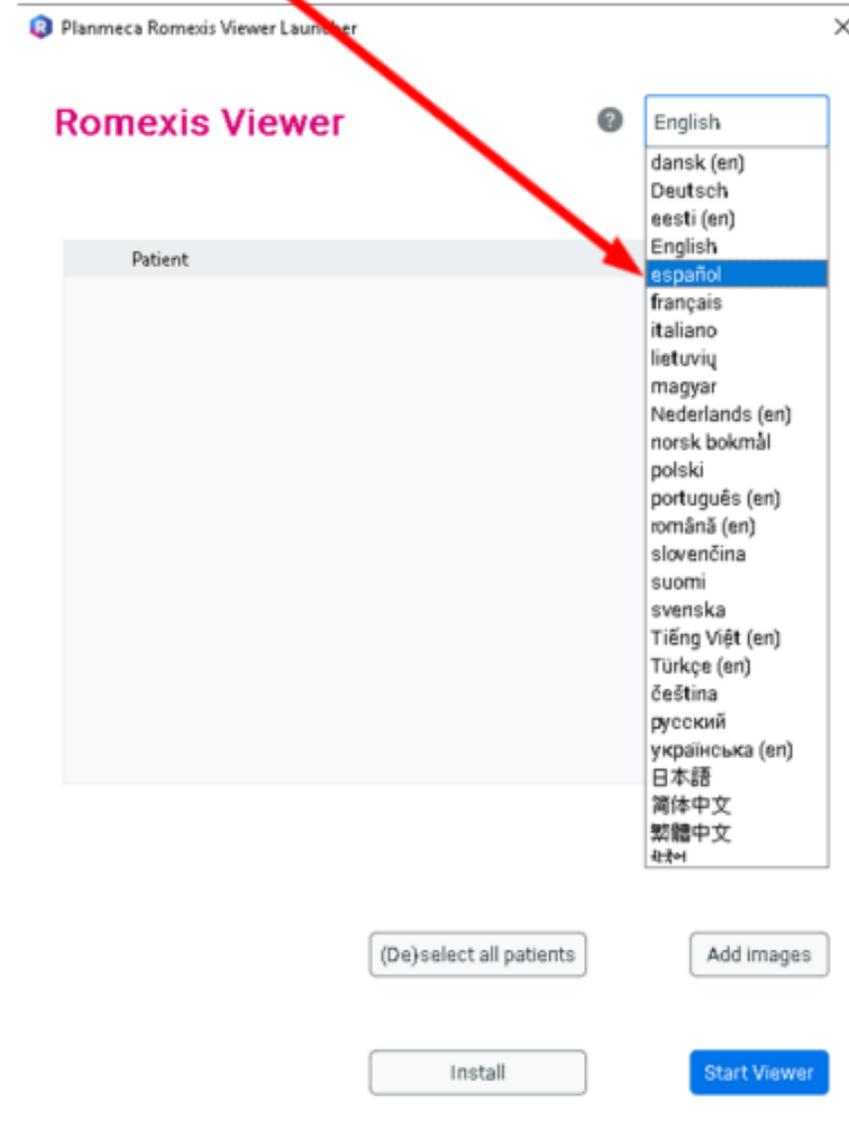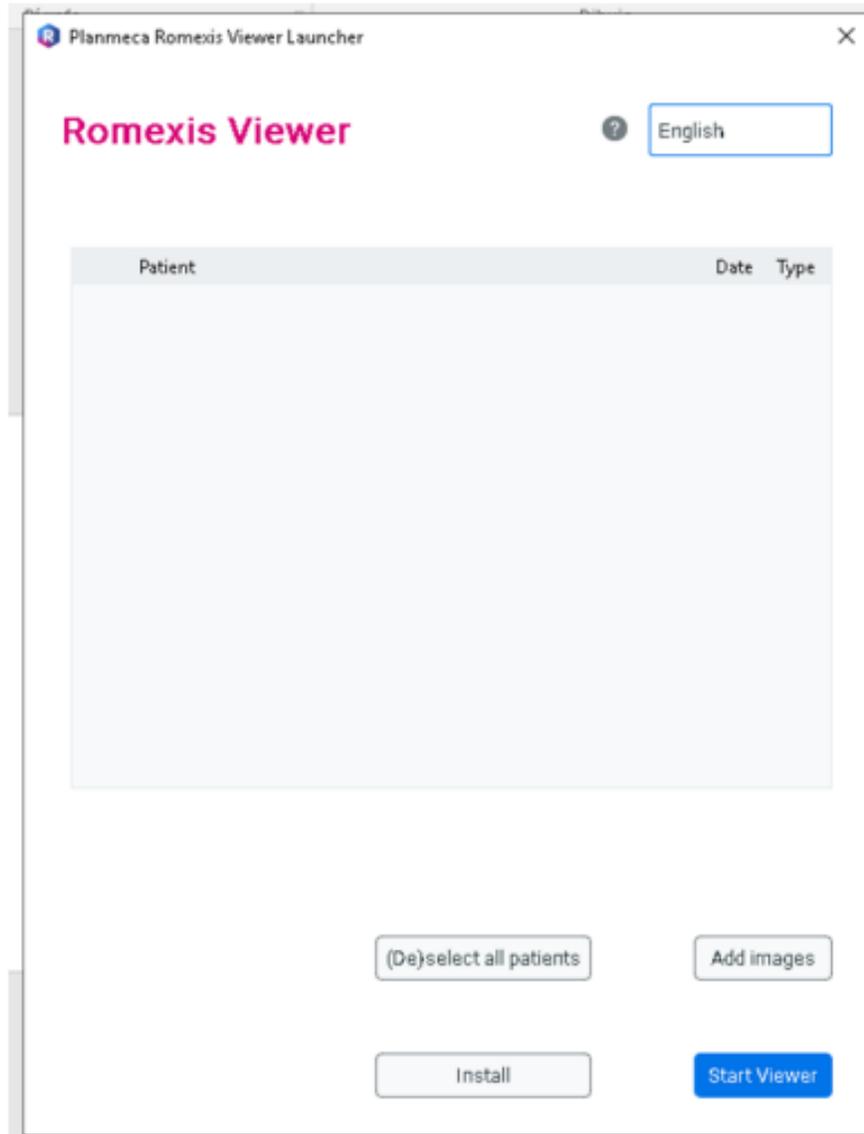

Escritorio

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
PlanmecaRomexisViewer (1)	8/5/2023 12:40	Carpeta comprimi...	890.310 KB
_- Sanguedolce Rios Gino - ---.dcm	8/5/2023 12:19	Archivo DCM	79.042 KB
PlanmecaRomexisViewer (1)	8/5/2023 12:45	Carpeta de archivos	

> la semana pasada
> El mes pasado
> al principio de este año
> hace mucho tiempo

Al archivo .DCM
arrastrarlo al visor

Planmeca Romexis Viewer Launcher

Romexis Viewer

español ▾

Paciente	Fecha	Tipo
----------	-------	------

(De)select all patients Añadir imágenes

COPIAR visualizador e iniciar INICIAR visualizador

Romexis Viewer

? español ▼

Paciente	Fecha	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/> Sanguedolce Gino	04.05.2023	3D CBCT

(De)select all patients

Añadir imágenes

COPIAR visualizador e iniciar

INICIAR visualizador


PLANMECA
Romexis



Lanzando Planmeca Romexis Viewer ...

Hacemos doble click en





INICIAR visualizador

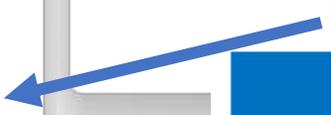

Abrir DICOM Abrir DICOMDIR Abrir caso de la nube

Guardar vista Rest. vista Guardar en 2D Cef virtual Prop. Img

04/05/23 20:15 - Ø8.0 × 5.0 cm (401 × 401 × 251) - 0.200 mm - 90 kV 6 mA 12.076 s - AXIAL

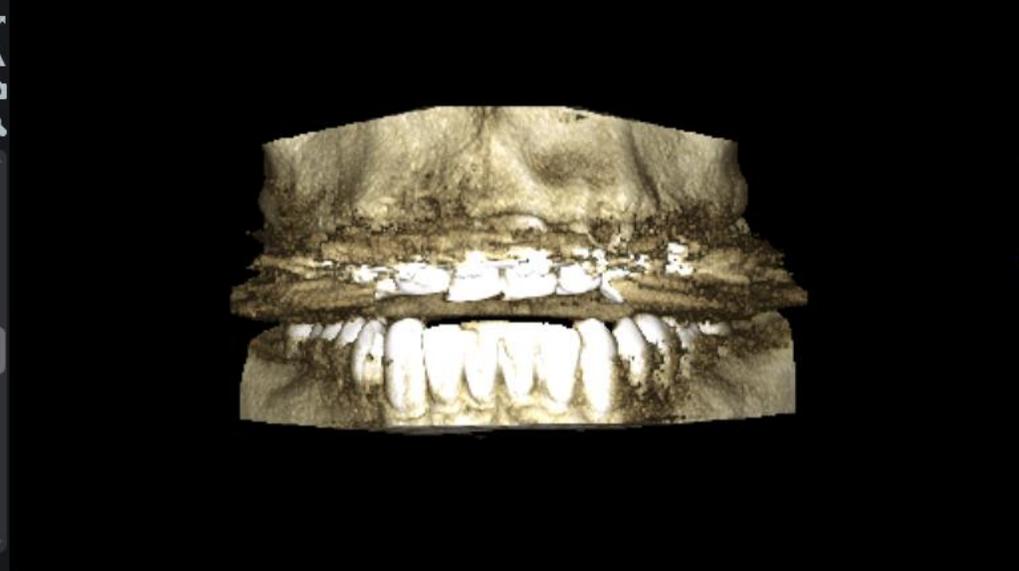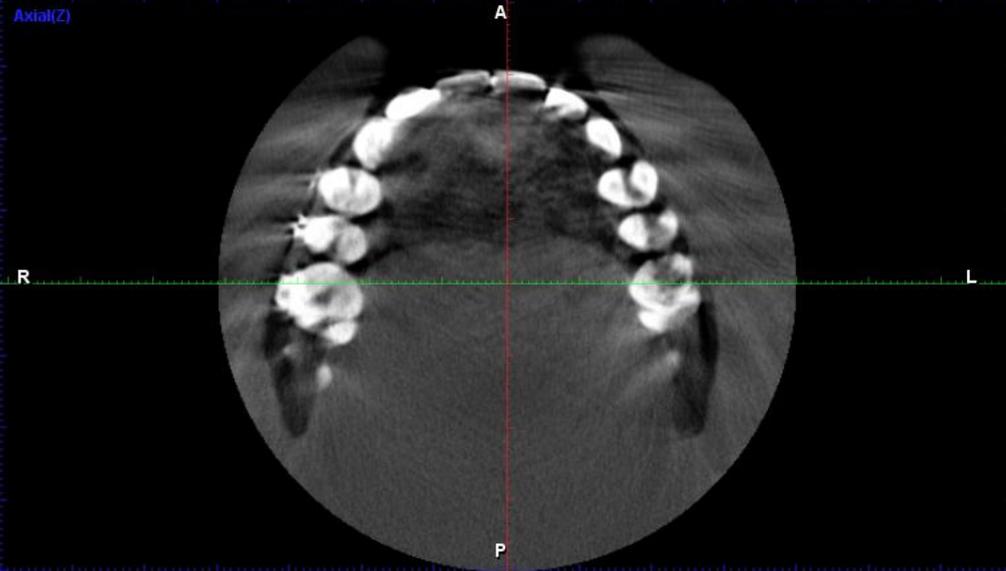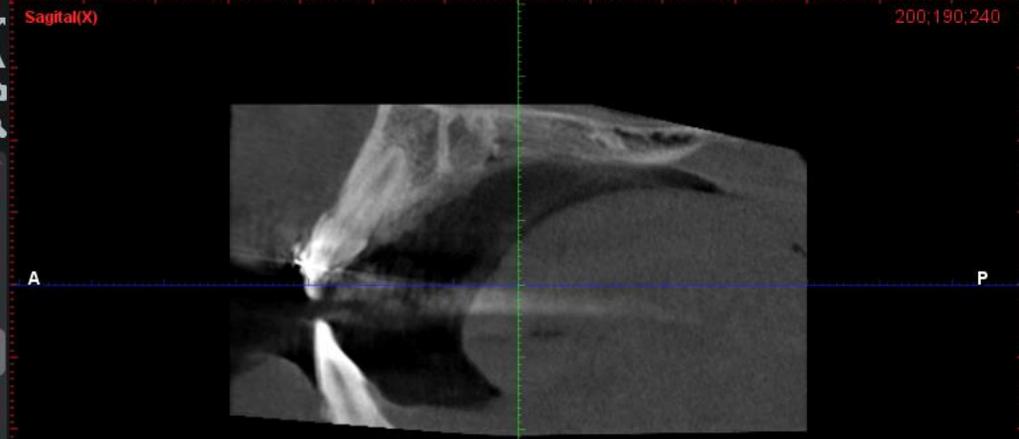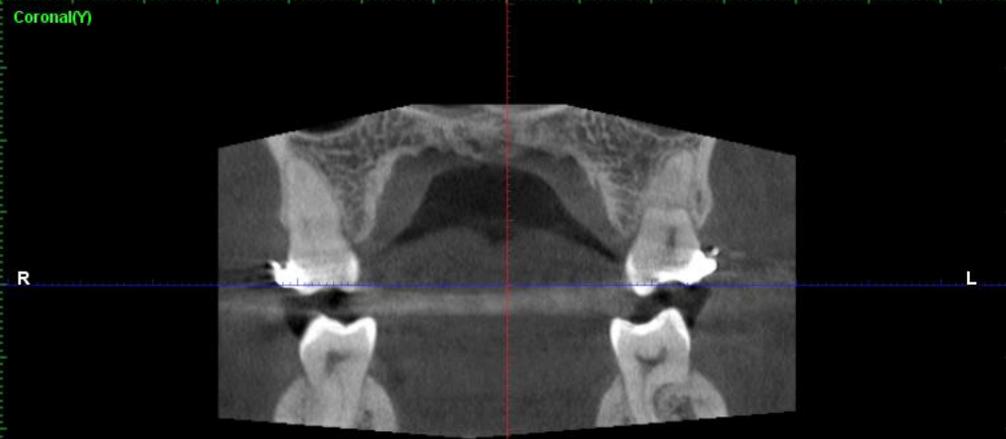

Ajustar

Grosor 0,600 mm

0

2032

0

Tools

PAN

Anotación

abc abc

Renderizado 3D

Hard Tissue

2032

2032

1250

2

Explorador de objetos